

# イーコレ付属ポンプ 使用方法

かたくする



ポンプと本体の接続部分を、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。



固定したい部位にあてがい、イーコレが固くなるまでポンプで空気を抜きます。

※赤丸部分から空気が出ますので、指でふさがないようにご注意ください



空気を抜いた後、青い部分を、指で押しながらポンプを本体から外します。


やわらかくする



この状態で空気が入ります



①

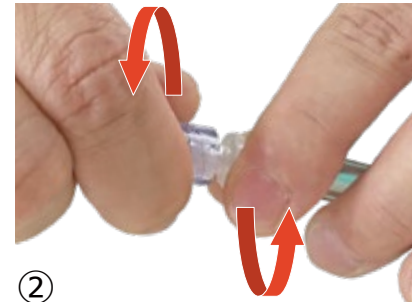

②



③

本体とポンプを取り付け、左図のポンプの○部分をねじりながら外します。その状態でしばらくおき、軽くもみほぐすと空気が入った状態になります。



ペンタゴンポンプ(注射器型・左図)をご使用の方も、空気の抜き方(かたくする方法)と入れ方(やわらかくする方法)は、上記の丸型ポンプと同じです。

チューブはポンプ本体から抜かず、購入したままの形状でご使用ください。万が一ポンプからチューブが抜けてしまった場合は、元の位置に取り付けてください。

チューブと反対側に取り付けているキャップは外さないでください。